


Ikke fjern denne informasjonen fra dispenserboksen.

Gallant Disposable Prep barberhøvler er pakket i en dispenserboks som inneholder 50 x dekselbeskyttede barberhøvler. Hovedfunksjonene er:

- Fingerspisskontroll gjennom grepskanter på håndtaket.
- Håndtak plassert foran bladet, krever kun et forsiktig trekk.
- Optimal visning av barberingsområdet.
- PTFE og CrN-belagt barberblad.
- Barberbladfasett spesielt utviklet for et jevnt kutt.

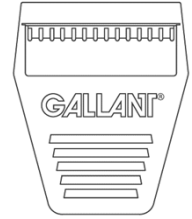

FORSIKTIG – Inneholder skarpe barberblader.



Instruksjoner for bruk:

1. Trekk forsiktig av beskyttelsesdekslet.
2. Plasser høvelen over barberingsområdet. Ikke bruk trykk. Før barberhøvelen forsiktig over huden.
3. Etter bruk, hold høvelen oppreist mot en flat overflate og trykk forsiktig til håndtaket klikker. Barberhøvelen er trygt deaktivert.
4. Plasthåndtaket kan resirkuleres og barberbladhodet kan kastes i en medisinsk sikkerhetsbeholder.



EU-samsvarserklæring.



Medisinsk teknisk produkt.



UDI: 7391100000018



Artikkelnummer: 120-354 / Dispenserboks med 50 x barberhøvler.



Serienummer dispenser boks.



Batch/ LOT. Se dispenserboks.



Ikke bruk hvis emballasjen er skadet.



Må ikke gjenbrukes/kun engangsbruk.



Usteril.



Produksjonsdato. Se dispenserboks.



Utløpsdato. Se dispenserboks.



Oppbevares tørt.



Holdes unna sollys.



Temperaturgrense. Lagre mellom 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Produsent: Konsultbyrå Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Sverige
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485-sertifisert foretak

Gallant Disposable Prep Razor medisinsk teknisk produktregistreringer:

- EU MDR klasse 1, EU SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.nr.: 3009143236
- MHRA UK reg.nr.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.nr: 326611

Ikke gjenbruk på andre pasienter. Risiko for krysskontaminering og infeksjon.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med produktet skal rapporteres til produsenten.