


Ta inte bort denna information från dispenserboxen.

Gallant Disposable Prep Razor är förpackade i en dispenserbox som innehåller 50 x omslagsskyddade rakhyvlar. De främsta egenskaperna är:

- Fingerspetskontroll genom greppkanter på handtaget.
- Handtaget är placerat framför bladet och kräver endast ett försiktigt drag.
- Optimal vy över rakningsområdet.
- PTFE och CrN belagt rakblad för mjuk och jämn rakning.
- Speciellt utvecklad rakbladfacett för effektiv och säker rakning.

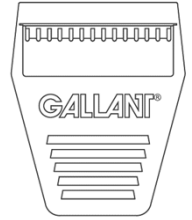

Var försiktig – Innehåller vassa rakblad.



Bruksanvisning:

1. Dra försiktigt av omslagsskyddet .
2. Placera rakhyveln över rakningsområdet. Använd inget tryck. Flytta rakhyveln försiktigt över huden.
3. Efter användning, håll rakhyveln upprätt mot en plan yta och tryck försiktigt tills handtaget snäpper. Rakhyveln är nu säkert inaktiverad.
4. Plasthandtaget kan återvinnas och rakbladshuvudet disponeras i en medicinsk säkerhetsbehållare.



CE-märkning, EU Komformitetsdeklarerad.



Medicinteknisk produkt.



Unik produkt identifiering, UDI: 7391100000018



Artikel/ katalognummer: 120-354/ Dispenserbox med 50 x rakhyvlar.



Serienummer, se dispenserbox.



Sats- partinummer, se dispenserbox.



Får inte användas om förpackningen är skadad.



Får ej återanvändas/ endast för engångsbruk.



Icke-steril.



Tillverkningsdatum, se dispenserbox.



Används före datum, se dispenserbox.



Förvaras torrt.



Skyddas från solljus.



Temperaturgräns. Förvara mellan 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Tillverkare: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Sverige.
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485 certified company

Gallant Disposable Prep Razor medicintekniska registreringar:

- EU MDR klass 1, SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611

Återanvänd inte på andra patienter. Risk för korskontaminering och infektion.
Alla allvarliga incidenter som inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren.

Version : R-0001 SWE Gallant Instructions for use Rev. E 2024-04-08